

# DETECTOR KIT CMT



## Reactivo para la detección rápida e inmediata de la mamitis

### TÉCNICA DE LA REACCIÓN

1. Depositar 2 ml aproximadamente de leche sospechosa de cada cuarterón en cada una de las tacitas de la paleta.
2. Añadir 2 ml, como mínimo, de reactivo DETECTOR KIT CMT a cada tacita.
3. Agitar suavemente con movimientos oscilatorios durante varios segundos.

### LECTURA DE LA REACCIÓN

- Negativa: La mezcla de los líquidos permanece fluida sin modificación de la consistencia. Color gris perla-violeta.
- Dudosa: Ligera alteración de la consistencia, que desaparece al poco tiempo. Color gris perla-violeta.
- Débilmente positiva: Aumento de la consistencia, con escasa gelificación. Al realizar movimientos circulares la mezcla tiende a colocarse en el centro, dejando libres los bordes de la tacita. Al cesar los movimientos, la mezcla se extiende uniformemente por todo el suelo de la taza. Color ligeramente violeta.
- Fuertemente positiva: Fuerte aumento de la consistencia con gelificación que ocasiona una superficie convexa, que ni siquiera en reposo ocupa todo el suelo de la taza. Color violeta intenso.

Las reacciones sobre leches calostrales, en período de secado o en mamitis traumáticas, son falsamente positivas y no deben tratarse como mamitis infecciosas.



### CONSERVACIÓN

Conservar en lugar seco, fresco y al abrigo de la luz.

### PRESENTACIÓN

Envase de 1 L.

No requiere prescripción veterinaria.

Titular: CZ Veterinaria, S.A.

Reg. N°: 0678 RD.

Para más información, consulte la Ficha Técnica.



**vêtia**<sup>®</sup>

VETIA ANIMAL HEALTH S.A. Calle Teide nº 4. 28703 San Sebastián de los Reyes - Madrid

www.vetia.es

**DIAGNÓSTICO**